


SANOHRA fly aikuisille

SANOHRA fly yli 1-vuotiaille lapsille ja aikuisille, joilla on pienet korvakäytävät

SANOHRA fly suojaa korvaa nopealta ilmanpaineen muutokselta, esim. sellaiselta, jota esiintyy lennon aikana.

Miten korvakipu ilmenee?

Korva on erittäin herkkä elin. Välikorva sijaitsee ilmatiiviin tärykalvon takana. Välikorvaan pääsee ilmaa korvatorven kautta. Nousun aikana matkustamon ilmanpaine laskee nopeasti. Tämä ei tavallisesti aiheuta vaikeuksia korvissa, koska korvatorven tulee vain passiivisesti päästää pois suhteellinen ylipaine välikorvasta. Laskeutumisen aikana ilmanpaine nousee muutamien minuuttien sisällä maanpinnan tasolle. Jos korvatorvi ei pysty avaamaan tarvittavaa aktiivista aukkoa, matala painetaso pysyy välikorvan sisällä, mikä aiheuttaa tärykalvon kaareutumisen. Tämä aiheuttaa korvakipua, mutta se voi myös ilmetä kipuna kasvoissa tai hammaskipunana. Käyttämällä SANOHRA fly -korvatulppaa, joka valvoo ilmanpainetta, paineenvaihteluita hidastetaan ennen tärykalvoa. SANOHRA fly tukee korvaa, jopa silloin kun korvatorven toiminta on vähentynyt, jotta sopeutuminen suuresti vaihteleviin paineolosuhteisiin kävisi kivuttomasti.

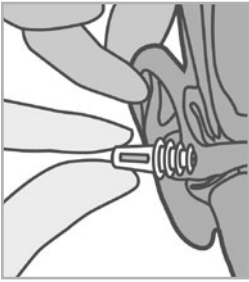

Miten SANOHRA fly laitetaan korvaan

Nosta toinen käsivarsi pään yläpuolelle ja nosta vähän ulkokorvan yläosaa toisella puolella päätä. Tämä laajentaa korvakäytävää. Käytä toisen käden peukaloa ja etusormea ja ota kiinni SANOHRA fly -tulpan kannasta ja laita se korvakäytävään ensin sen lamelleista liikuttamalla sitä hieman ja pyörittämällä.

Lapset eivät saa käyttää korvasuojaa ilman aikuisen valvontaa. Älä käytä, jos sinulla on korvatulehdus.

Milloin SANOHRA fly tulee laittaa paikalleen?

Nousun aikana: Ihmisten, joilla on ongelmia korvakivun kanssa jo nousun aikana, tulee laittaa SANOHRA fly paikalleen ennen lentokoneen nousua. SANOHRA fly voidaan poistaa 30 minuutin kuluttua, koska paineolosuhteiden oletetaan tasaantuvan heti, kun kone on saavuttanut matk korkeuden. Lyhyiden, alle kahden tunnin lentojen aikana SANOHRA fly -tulpan käyttämistä suositellaan koko lennon ajan.



Laskeutumisen aikana: Laita SANOHRA fly paikalleen kuvauksen mukaisesti vähintään 45 minuuttia ennen laskeutumista. Älä odota lentäjän ilmoitusta. Korvatorven toiminnan tukemista suositellaan pureskelemalla, nielemällä ja haukottelemalla. Korvasuojaus on optimaalinen, jos SANOHRA fly -tulppaa ei oteta pois ennen lentokentälle saapumista.

Huomaa, että toimintansa vuoksi SANOHRA fly aiheuttaa myös äänenvaimennusta.

Miten SANOHRA fly poistetaan

Nosta ulkokorvaa kuvauksen mukaan ennen poistamista. Älä ota korvatulppaa pois tempaisemalla, vaan poista se hieman pyörittävällä liikkeellä.

SANOHRA fly -tulppaa ei saa puhdistaa vedellä tai puhdistusaineella. Jo veden mineraalit pysäyttäisivät APC:n toiminnan. Myös ilmansaasteet ja korvan vaha voivat aiheuttaa tämän. Laita SANOHRA fly aina käytön jälkeen takaisin omaan laatikkoonsa. Varmista optimaalinen toiminta käyttämällä SANOHRA fly -tulppaa korkeintaan kolmen edestakaisen lentomatkan aikana.